





# iReach Omnia

## Nietapparaat op batterij

### Gebruikershandleiding

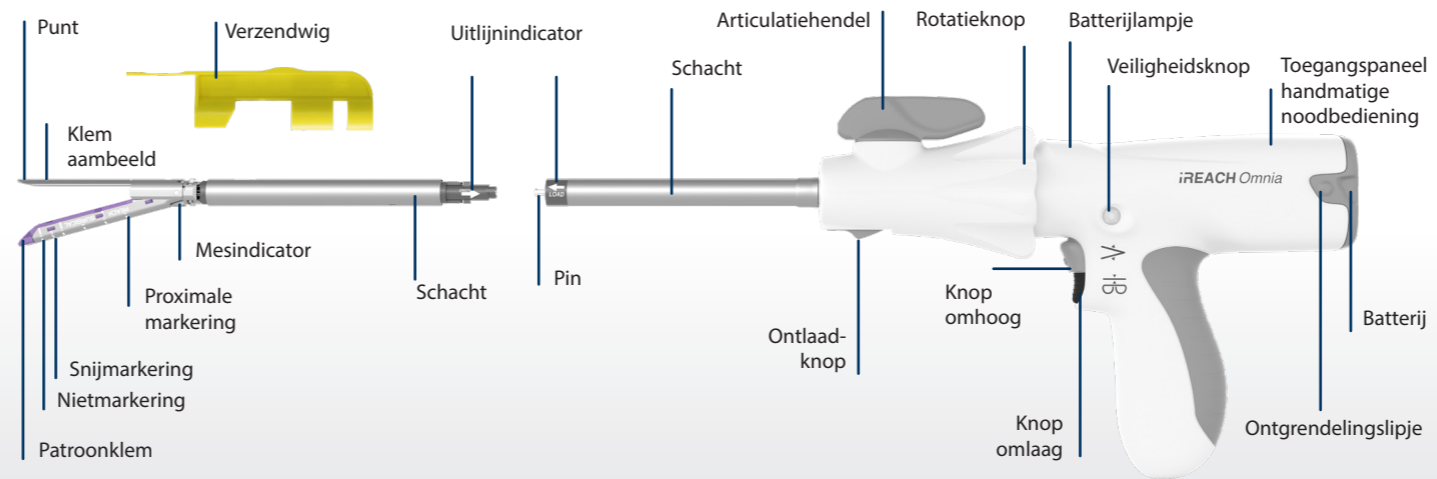

**1. Batterij plaatsen** — **Verwijderen** — **2. Laden** — **3. Scharnieren & draaien**

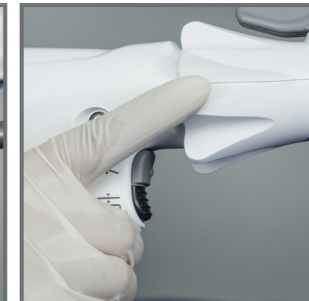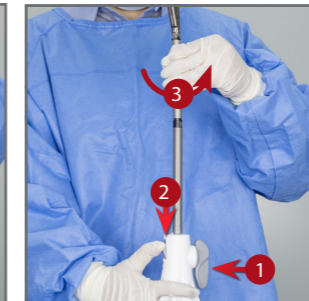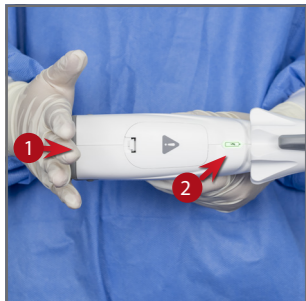

1. Om de batterij te plaatsen, controleert u eerst de uitlijning van de batterij met het apparaat.

Om de batterij te verwijderen, drukt u op het ontgrendelingslipje en verwijdert u de batterij.

Voordat u laadt, moet u ervoor zorgen dat 1. De articulatiehendel recht staat en niet schuin.

Lijn de twee uitlijn indicatoren (pijltjes) op de nietapparaat en de herlaadeenheid uit.

Breng de herlaadeenheid in de pin in via het distale uiteinde van de schacht. Nadat u de herlaadeenheid volledig in de schacht ingebracht heeft, draait u 45° met de klok mee om te vergrendelen. Zorg dat de ontlaadknop in zijn oorspronkelijke positie staat.

Verwijder de verzendwig en gooi deze weg.

Om te ontladen, 1. Zorgt u er eerst voor dat de klem open is en niet schuin staat. 2. Drukt u de ontlaadknop met één hand naar achteren, 3. Draait u met de andere hand de herlaadeenheid 45° tegen de klok in en verwijdert u deze van de schacht. Laat de ontlaadknop los en controleer of deze in zijn oorspronkelijke positie staat. Gooi de gebruikte herlaadeenheid weg.

Om te scharnieren, dient u de articulatiehendel om de klem te draaien.

Om te draaien, draait u aan de rotatieknop. De schacht kan u in beide richtingen draaien.

**Waarschuwing: Niet scharnieren of draaien wanneer er weefsel in de klem aanwezig is.**

**4. Klem sluiten en openen** — **5. Schieten** — **6. Probleemoplossing: automatische reset mes** — **7. Probleemoplossing: handmatige noodbediening**



Om de klem volledig te sluiten, moet u de knop omlaag induwen en zo houden.

Om de klem te openen, moet u de knop omhoog induwen.

Opmerking: u kan de klem slechts openen wanneer het mes in zijn oorspronkelijke positie staat.

Sluit de klem. De veiligheidsknop zal knipperen en na 15" vast branden en een geluid laten horen. U kunt eventueel 15 seconden wachten voor de voordruk. Om de veiligheid uit te schakelen, drukt u op de veiligheidsknop. Het lampje gaat uit wanneer het veiligheidsmechanisme uitgeschakeld is.

Om te schieten, moet u de knop omlaag induwen en zo houden. Als het mes de nietmarkering bereikt heeft, zal het stoppen en zult u een geluid horen. U kunt het schieten ook onderbreken. Om het schieten te onderbreken, moet u de knop omlaag loslaten. Om het schieten te hervatten, moet u de knop omlaag induwen en zo houden.

Controleer visueel de nietlijn en laat daarna de knop omlaag los, het mes zal naar zijn oorspronkelijke positie terugkeren.

U kunt de klem nu openen door de knop omhoog in te duwen.

Als het mes na het schieten en het loslaten van de knop omlaag niet naar zijn oorspronkelijke positie terugkeert of als het mes na een onderbreking en het induwen van de knop omhoog niet naar zijn oorspronkelijke positie terugkeert, moet u de batterij verwijderen en terugplaatsen. Dit zorgt voor een reset van het systeem waardoor het mes automatisch naar zijn oorspronkelijke positie terugkeert.

Als het mes na het verwijderen en terugplaatsen van de batterij nog steeds niet naar zijn oorspronkelijke positie terugkeert, moet u een handmatige noodbediening uitvoeren.

Verwijder de batterij en verwijder daarna het 'Toegangspaneel voor handmatige noodbediening' bovenaan de nietapparaat. Trek de resethendel (gemarkeerd als 1) loodrecht met de greep van het instrument.

Beweeg de terugkeerhendel (gemarkeerd als 2) enkele keren voor- en achterwaarts tot het mes naar zijn oorspronkelijke positie terugkeert en de klem opent.