



iReach Omnia - Agrafeuse linéaire coupante, articulée & motorisée

Guide de formation

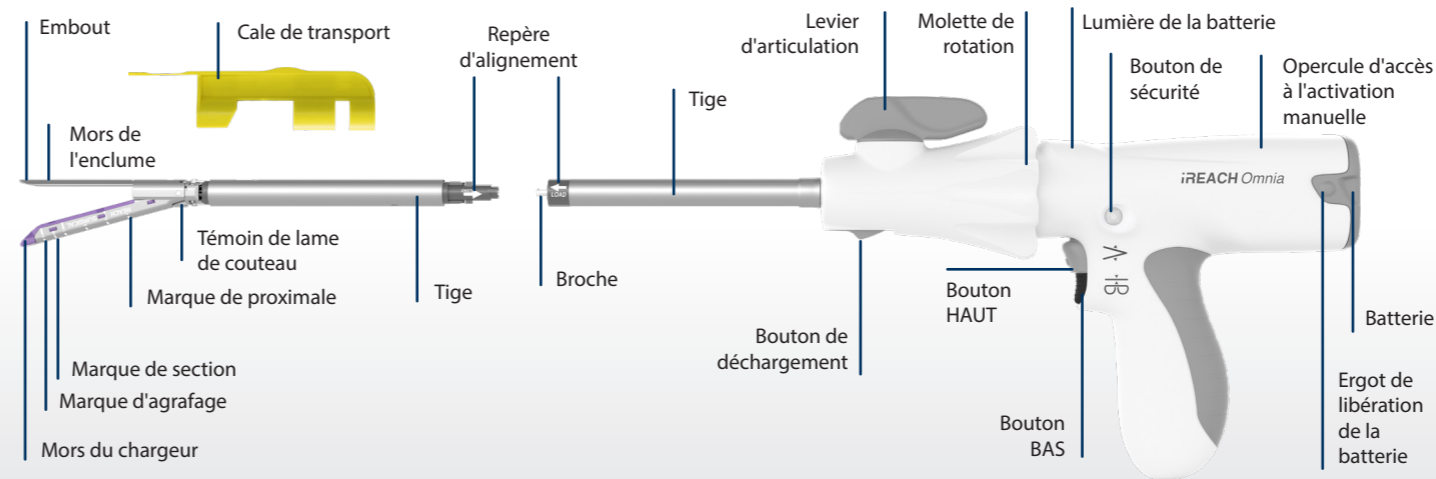


1. Installation et désinstallation de la Batterie

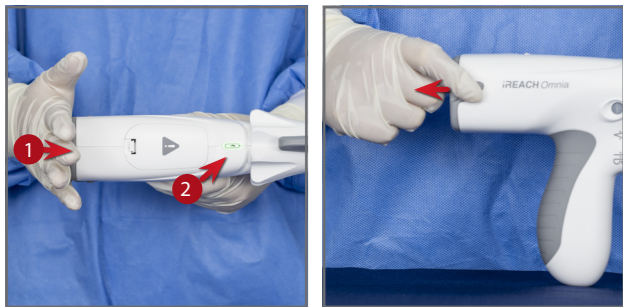

1. Pour installer la Batterie, confirmez d'abord son alignement avec l'appareil.
2. Poussez la batterie dans la prise, un clic audible se fait entendre et la Lumière de la batterie s'allume.


L'état de la batterie est indiqué par un code couleur. Le vert signifie que tout est normal, le jaune signifie que vous pouvez agraffer encore deux fois et le rouge signifie qu'elle doit être remplacée.

2. Installation du chargeur

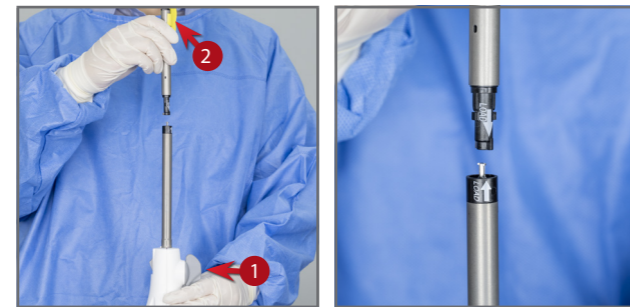

Avant l'installation, assurez-vous que le levier d'articulation est droit et non articulé.
S'assurer que la cale de transport est en place. N'utilisez pas le chargeur si la cale de transport est manquante.


Alignez verticalement les deux repères (flèches) de l'agrafeuse et du chargeur.

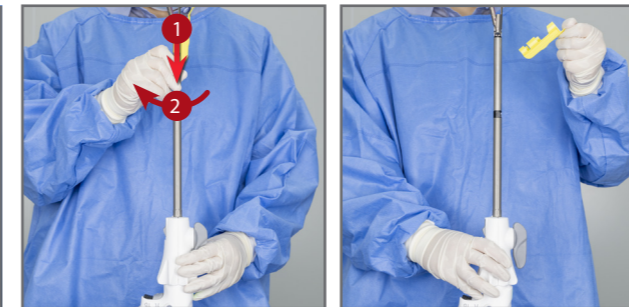

Insérez le chargeur dans la broche située à l'extrémité distale de la tige. Une fois que le chargeur est complètement inséré dans la tige, tournez-le de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Retirez la cale de transport et mettez-la au rebut.

Désinstallation du chargeur

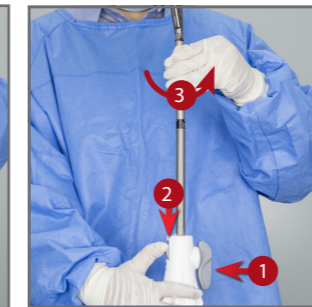

Pour désinstaller le chargeur, assurez-vous que les mors sont ouverts et non articulés. D'une main, appuyez sur le bouton de déchargement vers l'arrière, et de l'autre main, tournez le chargeur de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de la tige. Relâchez le bouton de déchargement et vérifiez qu'il a retrouvé sa position initiale. Éliminez le chargeur usagé. Ne pas restériliser ou réinstaller un chargeur usagé.

3. Rotation & Articulation



Pour articuler, faites pivoter le levier d'articulation pour articuler les mors.

Pour tourner, faites tourner la molette de rotation. La tige peut être tournée dans les deux sens.

Attention : Ne pas articuler ou faire pivoter lorsqu'il y a des tissus entre les mors.

4. Fermeture et ouverture des mors



Pour fermer complètement les mors, appuyez sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé.

Pour fermer les mâchoires à moitié, appuyez brièvement sur le bouton BAS, puis appuyez à nouveau pour fermer complètement les mâchoires. Cette fonction est utile pour les anastomoses latérales.

Pour ouvrir les mors, appuyez sur le bouton HAUT. Notez que vous ne pouvez ouvrir les mors que lorsque la lame est dans sa position d'origine.

5. Agrafage



Fermez les mors. Le bouton de sécurité commence à clignoter et reste allumé pendant 15 sec. jusqu'à un signal sonore. Cette option d'attendre 15 sec. pour la pré-compression est facultative.

Pour débrayer, appuyez sur le bouton de sécurité. Le voyant s'éteint lorsque le mécanisme de sécurité a été désengagé. Vous pouvez toujours ouvrir les mors en appuyant sur le bouton HAUT si vous n'avez pas commencé à agraffer.

Pour commencer à agraffer, appuyez sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé. Une fois que la lame a atteint la marque d'agrafage, elle s'arrête avec un signal sonore.

Vous pouvez faire une pause pendant l'agrafage. Pour interrompre l'agrafage, relâchez le bouton BAS. Vous pouvez poursuivre l'agrafage en appuyant sur le bouton BAS et en le maintenant enfoncé.

Vérifiez visuellement la ligne d'agrafe avant de relâcher le bouton BAS. Une fois que vous avez relâché le bouton BAS, la lame revient à sa position initiale.

Vous pouvez maintenant ouvrir les mors.

6. Dépannage : Retour automatique de la lame




Si la lame ne revient pas à sa position initiale après avoir relâché le bouton BAS après l'agrafage. Double-cliquez d'abord sur le bouton HAUT et attendez que la lame revienne à sa position initiale.

Si l'agrafeuse ne réagit pas, retirez la batterie et réinstallez-la.

Cela réinitialisera le système et la lame devrait revenir automatiquement à sa position initiale.

7. Dépannage : Retour manuel de la lame

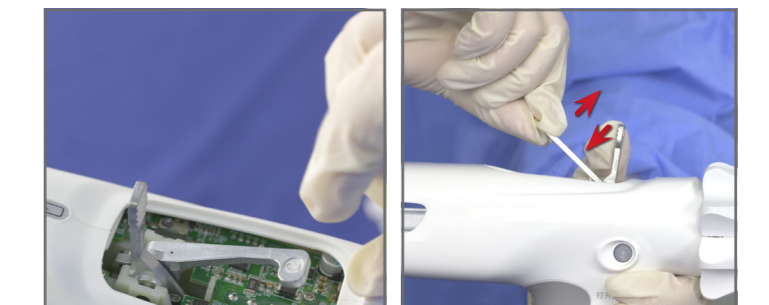

Si la lame ne peut pas revenir à sa position initiale après avoir retiré la batterie et l'avoir réinstallée. Effectuez la procédure manuelle :

- Retirez la batterie, puis retirez le panneau d'accès marqué d'un triangle sur le dessus de l'agrafeuse.
- Tirez le levier de réinitialisation (marqué 1) à fond jusqu'à ce qu'il soit perpendiculaire à la poignée de l'appareil.
- Déplacez le levier de retour (marqué 2) d'avant en arrière plusieurs fois jusqu'à ce que la lame soit dans sa position d'origine et que les mors soient ouverts.

Les mors sont maintenant débloqués. Retirez l'instrument par l'incision du trocart.